

4 RODAS

Finalidade:

Este andarilho serve para apoiar e/ou assistir pessoas com dificuldades de locomoção.

Características:

Andarilho dobrável de alumínio pintado, 4 rodas de 15cm de diâmetro. Rodas dianteiras giratórias e rodas traseiras fixas. Travões de dupla função nas rodas traseiras. Pegas anatômicas ajustáveis em altura para máximo conforto. Encosto e assento almofadados. Fornecido com saco de armazenamento.

Tubo de alumínio. Pegas em polipropileno. Assento com revestimento em PVC.

Peso máximo suportado: 100 Kg

Peso: 5,9 Kg

Dimensões: Largura: 52 cm; comprimento: 64 cm;

Altura: 71 a 84 cm;

Dimensões fechado: 55 x 21 x 81 cm

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP513

Marca: Mopedia

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: É recomendado que seja verificado pelo fabricante ou por um laboratório aprovado, pelo menos de 2 em 2 anos, a adequação à utilização do seu andarilho. Se as reparações forem utilizadas apenas peças sobressalentes originais e acessórios. Manter limpo utilizando um pano com água morna e sabão neutro. Seque com um pano limpo e seco.

Instruções de Utilização:

Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o andarilho estar danificado, contacte o revendedor mais próximo. Leia atentamente o manual de instruções. Antes de sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e, em seguida, bloqueie os travões. Certifique-se de que os travões estão bem bloqueados e que o andarilho está numa posição estável.

Imagens do Artigo:

