

**Finalidade:**

Colete perineal com alças de ombro. O colete com alças para cadeiras ou poltronas oferece soluções para problemas de instabilidade causados por deficiências físicas ou psicológicas funcionais. Impede o doente de se inclinar, escorregamento ou má postura. Proporciona um apoio firme e confortável na área perineal com uma fechadura de segurança nas costas para evitar o paciente o abra por si mesmo.

**Características:**

A zona do peito é feita de Saniluxe poliuretano (60% poliéster, 40% poliuretano).

A banda perineal é feita de uma banda respirável e tecido (poliéster).

As cintas que mantêm o utilizador no lugar são Polipropileno.

**Medida:** 305902 – S  
305901 – M  
305900 – L

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 305902 – S  
305901 – M  
305900 – L

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

É suficiente lavá-los periodicamente à mão ou à máquina, a uma temperatura máxima de 40°C. Secar em posição horizontal sem expor fontes diretas de calor, tais como fogões ou aquecedores. Aquecedores. Não tolera secadores. Não utilizar lixívia.

**Instruções de utilização**

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve passar através da zona perineal a área perineal, apertando as cintas de fixação para se ajustar ao contorno da cintura do paciente, assegurando que não há folga a cintura do paciente, certificando-se de que está firme.

**Imagens do Artigo:**