

MANUAL

Finalidade:

A cadeira de transporte ESSENTIAL com Bandeja é uma cadeira com rodas manual para pessoas dependentes. Uso interior apenas. O assento da sua cadeira está equipado com uma espuma visco.

Características:

- Cadeira coberta com espuma HD (Alta Densidade)
- Assento equipado com espuma visco
- Travesseiro cervical
- Arreio 4 pontos
- 3 tipos diferentes de revestimentos disponíveis : Pvc/Poliuretano : Cacau
 - Largura de assento: 50 cm
 - Altura do solo/ assento : 48 cm
 - Dimensão geral: 73 cm (T10)
 - Peso da cadeira: +- 38 Kg
 - Peso máximo utilizador: 130 Kg

Largura da base do assento	Profundidade da base do assento	Largura total	Altura do assento	Altura total	Peso da cadeira	Utilizador de peso <u>Maxi</u>
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
Tolerâncias dimensionais e de peso ± 15mm / 1,5 kg						

Lote: Ver embalagem

Cor: Castanho

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: Essencial

Regulamento: 2017/745

Classificação: Classe I

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Para manter a sua cadeira de rodas INNOV'SA em bom estado, deve realizar um serviço de manutenção regular da seguinte forma:

- Controle e limpe as rodas. Substitua as rodas quando necessário.
- Controlo da fixação dos parafusos, das pegas e dos botões de regulação.
- Controla os travões.
- Verifique a cadeira (limpeza, fissuras, danos nas peças estruturais, etc.) e limpe-a. Volte a colocar o revestimento quando necessário.

Instruções de Utilização:

A sua cadeira de rodas só deve ser usada em superfícies onde as quatro rodas toquem no chão e onde haja contacto suficiente para conduzir as rodas de uma forma equilibrada.

É recomendado treinar para uso em superfícies irregulares (pedras de pavimentação, etc.), declives, curvas e para passar obstáculos (passeios, etc.).

Garantir a leitura detalhada do Manual de Instruções.

Imagens do Artigo:

