

**Finalidade:**

Pele sintética anti escaras Suapel Sanitized. O exterior em fibra de poliéster dá uma sensação de conforto, sendo adequado para pacientes que necessitam de calor e conforto, extra calor, graças ao seu tecido tipo lã.

É adequado para utilização em cadeiras de rodas, poltronas e camas, bem como em poltronas ou camas.

**Características:**

Composição: poliéster, terlenka

**Dimensões:** 90 x 190 cm

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 105111

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Os produtos cáusticos são proibidos, são proibidos solventes e objectos cortantes em contacto directo com o produto. Evitar o contacto prolongado de líquidos e humidade com o humidade com a folha de zaragatoa. Verifique regularmente para o desgaste normal do lençol/pele. O tratamento de cobertura Sanitized é aplicado à superfície do tecido para criar uma barreira anti-ácaros, anti-bacteriana e anti-fúngica. Um factor adicional de protecção.

**Manutenção e armazenamento:**

A pele Suapel deve ser armazenada de preferência numa posição plana protegidos da luz natural e da humidade.

**Instruções de utilização:**

A primeira prevenção de escaras em posição sentada ou deitado, consiste em mudar o corpo, pontos de apoio do corpo na zona onde repousa. Em média, isto deve ser feito de três em três horas, a fim de reduzir demasiado a pressão prolongada sobre as áreas de proeminências ósseas, áreas de destaque ósseo e permitir o acesso do sangue aos tecidos. O lençol deve ser verificado para garantir que se ajusta ao assento ou cama onde será utilizado.

A forma dos lençóis de Suapel é concebida para se adaptar a diferentes tipos de assentos e roupa de cama e as suas necessidades.

**Imagens do Artigo:**