

Finalidade:

Imobilização de suporte da articulação do ombro em rotação, abdução e antepulsão. Escolha do ângulo de flexão do cotovelo. Distribui o peso dos braços para melhor suporte e de posicionamento.

Indicado para:

Fracturas do úmero subcapital.
Reparação da articulação do ombro.
Fractura da clavícula.
Subluxação da articulação glenoumeral.
Deslocação acrómio-clavicular.
Tratamento de traumatismos nos ombros e braços.
Pós-cirurgia.

Características:

Confortável. Imobilização segura e eficaz
Imobiliza o ombro em rotação interna.
Controla a flexão-extensão, rotação e abdução do ombro.
Mantém o cotovelo em flexão de 90° e pronação intermédia.
Bilateral

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: SLG100

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladas umas às outras ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde ou ferro a roupa. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não expor diretamente a uma fonte de calor direto.

Instruções de utilização:

A escolha correcta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento. Design de fácil colocação e remoção pelo próprio utilizador. O cotovelo deve estar na ponta da bolsa e o pulso deve estar dentro do suporte.

Imagens do Artigo: