

Finalidade:

Colete (Espartilho), órtese toracolombares passivo formado por um suporte abdominal anterior ligado na parte posterior de uma estrutura rígida, que se estende para a primeira vertebra dorsal. A flexibilidade permite adaptação á morfologia da maior parte dos pacientes, está indicado para:

Lombalgias, Espondilolistese; Degeneração Discal- Fraturas Vertebrais do corpo- Espondiloartrose; Osteoporose; Pós-Cirurgico, após a cirurgia de artrodese.

Imobilização: Correção da Lordose, controlo da flexão-extensão e inclinação lateral.

Características

Estrutura rígida e maleável de alumínio. Apoio abdominal para uma adaptação perfeita ao doente. Ajuste por meio de dois pares de correias de ajuste. O material é hipoalergénico.

Cores: Beje

Dimensões:

S, M, L
PERÍMETRO DE TROCÁNTERES EN CM. S (85-95), M (95-105), L (105-115), XL (115-125)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: CLS501

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lave com um pano húmido e sabão neutro. Durante a lavagem, os velcros deverão estar colados e mantidos fechados. Secar á temperatura ambiente. Não expor a ortese diretamente a uma fonte de calor direto. Guardar em temperatura ambiente. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes, podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Colocar o colete a envolver o tronco, contorno pélvico adaptado para o paciente com aperto das alças presas com velcro, tanto na frente como atrás.

Precauções:

A peça de vestuário deve ser utilizada estritamente como dirigido pelo médico ou técnico. O material utilizado é hipoalergénico, mas se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer, remover o produto e consultar o médico que prescreveu.

Imagens do Artigo: