

MANUAL INSTRUÇÕES – ALMOFADA DE AQUECIMENTO

REF.ª 861214 / 861215



REF.ª 8614214 (Baleia Azul)



REF.ª 861215 (Cão)

Introdução:

Artigo com enchimento para dispersão de calor, permitindo uma sensação de relaxamento e bem-estar. Pode ser usado para tratamentos de calor.

Tipos de enchimento:

- Caroços de cereja
- Grainha de uva
- Perolas de silicone
- Grânulos de cerâmica
- Sementes de colza

Instruções de utilização:

O artigo pode ser reutilizado ou reciclado

Informação de segurança:

O fabricante não assume responsabilidade por danos ou acidentes causados por uso indevido, ou o não cumprimento das instruções de utilização.

Indicações de utilização:

Relaxamento através de terapia de calor.

Utilização doméstica (não profissional)

Contra Indicações:

- Não utilizar em casos de febre, patologias com perda de sensibilidade á temperatura.
- Não utilizar no caso de patologias ou lesões da pele.
- Em caso de dúvida, consultar o seu médico ou farmacêutico.

Instruções de segurança:

- Artigo para utilização externa em pele sã. O enchimento não deve ser ingerido.
- Antes de cada utilização, deve ser verificado o estado e desgaste do artigo, só utilizar em caso de ausência de danos.
- O artigo pode danificar-se em contacto com calor, superfícies cortantes, óleo, gordura, ou exposição solar direta.
- O processo de aquecimento deve ser efetuado por um adulto.
- A utilização por parte de crianças, deve ser supervisionada por um adulto.
- Os utentes com capacidades mentais diminuídas ou com patologias que afetam a sensibilidade ao calor, devem utilizar o artigo sob supervisão.

Aviso para aquecimento no micro-ondas:

- O artigo pode sofrer danos por sobreaquecimento.
- Não utilizar se danificado.
- Aquecer no micro-ondas sempre com um copo de água meio cheio. Se o artigo tiver uma capa, deve ser removida antes do aquecimento.
- Não aquecer o artigo na função grill ou dentro de um recipiente com água.
- Nunca colocar um objeto de metal durante o aquecimento.
- Utilizar um prato próprio para micro-ondas.
- O prato rotativo do micro-ondas, deve estar limpo e capaz de rodar.

Siga as instruções de operação do micro-ondas e de aquecimento no micro-ondas:

- 1- Distenda o artigo de forma plana no micro-ondas, e o enchimento de forma uniforme.
- 2- Utilize o micro-ondas de acordo com as instruções na etiqueta do produto.
- 3- Depois de aquecer, manuseie o artigo para uniformizar a temperatura.

- 4- Teste a temperatura no seu antebraço
- 5- Se a temperatura não for suficiente, repita os passos 1 a 4
- 6- Se a temperatura estiver muito quente, arrefeça á temperatura ambiente e verifique se existem danos
- 7- Não utilizar mais de 20 minutos no mesmo ponto do seu corpo.

Aquecimento no forno:

Máximo 10 minutos a 80º C

Aviso de queimaduras:

Se o artigo estiver muito quente pode causar queimaduras.

As queimaduras podem ocorrer em temperaturas superiores a 42º C, dependendo da duração de utilização.

Aguarde algum tempo de recuperação antes de colocar novamente um artigo quente.

Remova o artigo imediatamente se o calor ficar desconfortável.

Manutenção, armazenamento e eliminação do artigo:

- Guardar em local seco
- Evitar exposição solar direta
- Não lavar o enchimento, se necessário limpar com um pano húmido.
- Se tiver capa, pode ser lavada de acordo com as instruções na etiqueta.
- Por razões de higiene o artigo deve ser substituído após 3 anos da data de compra.
- O produto pode ser eliminado no contentor de lixo doméstico.

Informação técnica:

| | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Aquecer o artigo no micro-ondas (sem função grill) | . Sementes de colza . Carços de cereja . Grainha de uva | . Perolas de gel | Grânulos de cerâmica |
| 600-800 watts | 60 segundos (máx 2x) | 100 segundos (máx 2x) | 100 segundos (máx 2x) |
| 800-1000 wats | 40 segundos (máx 2x) | 80 segundos (máx 2x) | 80 segundos (máx 2x) |

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.