

**Finalidade:** A Bengala anatómica Dobrável é concebida para lhe permitir equilibrar o seu peso ou retirar a carga dos membros inferiores ao andar. Indicado para os utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança. Permite uma marcha segura e confortável de caminhar graças à sua robusta estrutura de alumínio, é também adequada para quem sofre de problemas reumáticos. A pega oferece um bom suporte para a palma da mão, melhorando o conforto, estando disponível para a mão esquerda e para a mão direita.

**Indicações:** Perda de autonomia devido a distúrbios; Distúrbios de equilíbrio e/ou postura; Problemas de marcha; Programa de reabilitação após uma lesão ou operação.

**Características:** Estrutura de alumínio leve. Punho confortável para a mão. Entregue com pulseira (alça de mão). Carga Máxima: 120Kg. Peso: 335gr.

**Dimensões:**

Dobrado: 30cm

Altura Punho Ajustável de 83,5 a 93,5 cm.

**Cor:** Preta

**Modelo:** 816077.D (direita) / 816077.G (esquerda)

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Declaração de conformidade:**

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

A bengala deve de ser limpa regularmente com um produto suave de limpeza e um pano macio. Nunca utilizar produtos oleosos, corre o risco de escorregar. As borrachas devem ser verificadas e mudadas regularmente.

**Instruções de utilização:**

Retire a bengala do seu saco. Uma vez fora, ajuste a altura, solte o anel de bloqueio. Pressione o botão de bloqueio situado na parte inferior do tubo telescópico e deslize até ao próximo orifício. Aperte o anel de bloqueio. A bengala dobrável tem um orifício para montagem no tubo externo e 5 furos no tubo interno, permite até 5 configurações. Pode ser ajustado a cada 2 cm. A bengala é dobrável em 4 partes. Antes de usar, assegure-se sempre de que o anel de bloqueio está firmemente seguro no lugar e, que o botão de bloqueio está totalmente encaixado no orifício selecionado. Para desdobrar, solte um tubo de cada vez, e encaixe-os até todos ficarem conectados entre si. Verifique que todos estão no lugar. Para dobrar, puxe dois tubos para baixo e dobre um no outro. Repita a operação com os restantes.

**Imagens do Artigo:**

