

Finalidade: Este andarilho de joelho é o suporte perfeito para pessoas que têm dificuldade em colocar o pé no chão. Permite que você caminhe enquanto mantém a perna dobrada confortavelmente. O andador com descanso de joelho permitirá que você se mova com facilidade e segurança. Ideal para indivíduos que se recuperam de cirurgias nos pés, fraturas, entorses, amputações e úlceras nos pés. Pode ser usado como uma alternativa às muletas durante a recuperação de lesões, pois oferece mais suporte, exerce menos pressão sobre a parte superior do corpo e está equipado com freios. Também equipado com uma cesta com tampa, removível na frente do andarilho.

Características: Este andarilho está equipado com um travão que bloqueia simultaneamente as 2 rodas traseiras. Dobrável para fácil armazenamento. Travão simples e travão de estacionamento. Almofada de apoio acolchoada, proporciona conforto. Estrutura em alumínio e rodas antiderrapantes de 20cm de diâmetro. Possui uma cesta com tampa para carregar alguns objetos, como por exemplo, uma garrafa de água, a carteira, etc...

Peso 10,2 kg.

Peso máximo permitido: 136 kg.

Dimensões Totais: Largura: 49,5 (frente) e 24 (trás) x profundidade 76 x altura 91 a 106 cm.

Almofada de apoio: largura 20 x profundidade 36 x altura 48,5 a 59 cm.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: 2017/745

Modelo: 826175

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: O assento pode ser limpo com qualquer produto de limpeza doméstica não abrasivo ou corrosivo. Solventes e cloro não são permitidos.

Instruções de utilização: Retire da embalagem todas as peças e constituintes do artigo. Caso efetue a montagem no chão, coloque um pedaço de papel ou tapete no chão para evitar arranhões. Para saber todos os passos para a montagem do artigo, consulte o manual de instruções que o acompanha.

Imagens do Artigo:

