

SOFÁ DE ELEVAÇÃO

PRIMO CONFORT- Ref. 821012



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INTRODUÇÃO :

Este sofá elevatório foi concebido para ajudar as pessoas a levantarem-se facilmente. O encosto inclinado e o apoio de pernas proporcionam um grande conforto em todas as posições.

Por favor leia atentamente o manual do utilizador para uma utilização otimizada, especialmente as instruções de segurança.

Este manual deve ser retido para utilização futura após a primeira leitura.

RESUMO

1. SEGURANÇA
2. CARACTERÍSTICAS
3. MONTAGEM
4. USO

1. SEGURANÇA

Atenção

A cadeira deve ser montada correctamente, de acordo com as instruções aqui escritas. O fabricante, os seus agentes e distribuidores não são responsáveis por danos causados pela montagem incorrecta do sofá.

Deve ser colocado em terreno nivelado.

Não utilizar o sofá num ambiente húmido ou poeirento.

Deve ser utilizado em ambiente seco. Não utilizar a temperaturas superiores a 40°C.

- Não colocar o sofá perto de radiadores, fogões ou outras fontes de calor.
- Não utilizar o sofá cadeira ao ar livre.

Quando o sofá não estiver a ser utilizado, desligar o cabo de alimentação da rede eléctrica.

Não descansar ou colocar um objecto pesado no apoio do braço, apoio para os pés ou costas da cadeira.

Não saltar nem brincar em cima do sofá.

- Não dormir no sofá durante o funcionamento.

As crianças devem ser supervisionadas por um adulto quando utilizam o sofá, não lhes é destinado.

- Verificar se a voltagem corresponde às especificações do sofá.
- A alimentação deve ser efectuada em conformidade com os regulamentos locais.
- Não ligar ou desligar a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Para desligar a ficha, puxe-a pela ficha e não pelo cabo.
- Não colocar o cabo debaixo da cadeira para evitar danos ou curto-circuitos.

Não deixar o cabo de alimentação e o cabo de controlo remoto pendurados da cadeira. Não utilizar o sofá se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se a tomada estiver demasiado solta. Contacte um especialista.

Contacte um especialista. Se necessário, o cabo de alimentação pode ser substituído por um cabo idêntico. O trabalho deve ser realizado por um técnico qualificado.

Não utilizar o controlo remoto com as mãos molhadas.

- Não deixar cair o controlo remoto.

Não colocar objectos pesados sobre o cabo de controlo remoto.

• Não colocar os dedos ou as mãos entre o assento e o apoio de pernas quando o sofá estiver inclinada ou quando o sofá estiver em movimento.

- Esta cadeira deve ser utilizada de acordo com as instruções fornecidas.
- Não é para uso profissional.
- O fabricante, os seus agentes e distribuidores não serão responsáveis por quaisquer danos pessoais ou danos materiais resultantes do ou danos materiais resultantes do mau uso e abuso desta cadeira.

Nota: As reparações devem ser efectuadas por pessoal qualificado ou pelo serviço pós-venda.

Atenção

Utilizar o sofá numa sala de temperatura moderada, não aumentar a temperatura abruptamente. Recomenda-se o aumento gradual da temperatura até um nível normal. Se o sofá for guardada numa sala fria e levada para um local quente, recomenda-se a sua utilização uma hora mais tarde para otimizar o seu desempenho.

O sofá não deve ser utilizado:

nas seguintes condições, desligar imediatamente o aparelho e desligar o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Se necessário, contactar um profissional para manutenção.

Se for derramada água acidentalmente sobre o sofá. Isto pode causar um choque eléctrico.

Se o estofo estiver rasgado e o mecanismo interior estiver visível.

Se for detectada uma situação anormal ou um mau funcionamento.

Se houver uma falha de energia, pode ocorrer perigo quando a energia é restaurada inesperadamente. Se houver uma trovoada com relâmpagos.

Nota: Verificar regularmente o estado do tecido.

2. CARACTERÍSTICAS :

Peso: - o peso do sofá é 43 kg
- a carga máxima é 120 kg

Alimentação: 100~240 V ~ --S=0_Hz

Material de revestimento: P.U - PVC - Poliéster,

dependendo da versão.

Composição do enchimento: Espuma P.U. e fibra de poliéster


Estrutura: Madeira e aço.

Estrutura do motor: Aço


3. MONTAGEM:

O sofá está embalado em 1 caixa de cartão. O encosto e o assento devem ser montados de acordo com as instruções de montagem.

Nota: Não montar o sofá se os estofos ou peças estiverem danificados. Verificar cuidadosamente todas as peças antes da montagem. Em caso de problemas, queira contactar o vendedor.

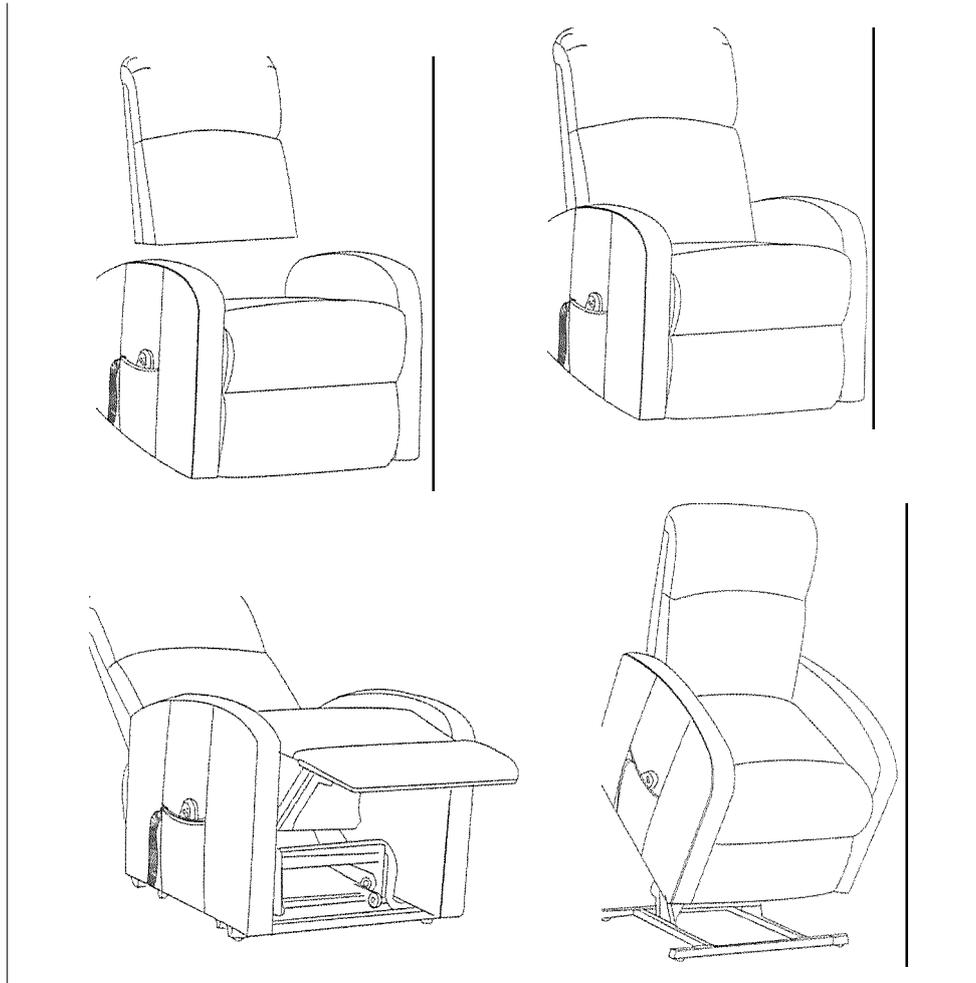

Nota: Certificar-se de que os cabos estão ligados correctamente.

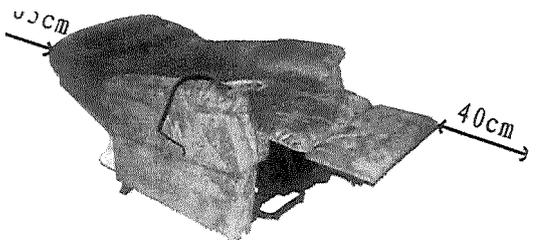

4. USO:


- Proporcionar espaço suficiente à frente e atrás da cadeira para permitir uma inclinação adequada.
- Colocar a cadeira sobre uma superfície plana e seca.

Precaução:

- Certifique-se de que não existem obstáculos à frente e atrás da cadeira antes de a utilizar.
- Não inserir dedos ou objectos entre a cadeira e o apoio para os pés.

Controlo remoto

Utilizar apenas um pano seco para a limpeza. Controlo remoto para elevação e inclinação da cadeira .

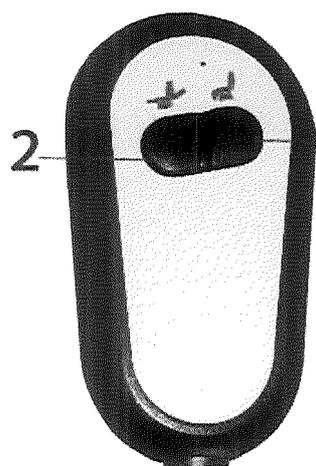

1 - Levantar o sofá da posição deitada para a posição normal e depois para a posição elevada.

2 Baixar o sofá da posição alta para a posição normal e depois voltar à posição de repouso.

ATENÇÃO: :

- Não repare. Contacte um especialista.

Dicas para o cuidado e armazenamento :

- Manter o sofá limpa e livre de pó e longe da humidade.
- Se o sofá não for utilizado durante um longo período de tempo, cobri-lo com um pano macio para a proteger do pó. Armazená-lo num local seco.
- Não armazenar o sofá à luz directa do sol ou em zonas de altas temperaturas. Isto pode fazer com que o tecido se desvaneça.
- Antes de limpar, certifique-se de que o interruptor principal é desligado e que a tomada é removida.

IDENTITÉS

Rue de la Forgerie - ZA Pole 49 - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - www.identites.eu