

**Finalidade:** As almofadas Anti Escaras, previnem o aparecimento de úlceras de pressão, que surgem devido à permanência do corpo na mesma posição durante longos períodos de tempo. As úlceras de pressão, surgem principalmente em zonas de proeminências ósseas e pontos de apoio do corpo, como calcanhares, glúteos, ombros, joelhos, cotovelos e bacia. A pressão excessiva sobre um ponto do corpo, limita o aporte de sangue a essa mesma zona e conseqüentemente de oxigénio, originando vermelhidão, destruição da derme/epiderme e conseqüentemente feridas superficiais e/ou profundas.

**Indicação:** Almofada de conforto e Prevenção de escaras. Risco de escara: Médio/Baixo

**Composição:** Poliuretano/Viscoelástico de média densidade e bolsa superior de Gel siliconado. Evitar forças de tração na superfície da almofada

**Peso máximo:** Utentes até 90 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** EV700 (Evogel)

**Marca:** Evoluxion

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Dimensões:** 42x42x8 cm

**Fabricante:** N.Y.T. Technology Co. Ltd. Building 1, Group, Tangfang Village, Jiangsu. China.

**Importador:**

Evoluxion Health, Lda.  
Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7  
1600-477 Lisboa, Portugal  
info@evoluxionhealth.com

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -  
qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

**Capa:** Todas as almofadas trazem uma capa removível, que permite a sua lavagem. A capa, pode ser lavada à mão com água fria, utilizando produtos não abrasivos ou pode ser lavada na máquina, utilizando um programa para roupa delicada, a frio e sem centrifugação. Recomenda-se a utilização de uma rede de proteção de forma a evitar a deformação da capa durante a lavagem. Não usar lixívia; Não passar a ferro.

**Núcleo da Almofada:** Bloco de espuma Viscoelástica, com topo em gel siliconado. - **Não molhar.**

Armazenar a almofada preferencialmente na horizontal, evitando a exposição solar e humidade.

**Instruções de Utilização:**

Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar tanto em cadeira de rodas, como para assentos convencionais, tais como, sofás, cadeiras, bancos, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas.

**Imagens do Artigo:**

