

MANUAL

Máscara de Proteção Facial MSK100 e MSK500

MSK100 Transparente



MSK500 Carbono



Indicações

- Proteção facial para uso desportivo.
- Proteção contra lesões no septo nasal, maçãs do rosto, sobrancelhas e/ou testa.

Características

- . **MKS500:** Estrutura fabricada em TFC, um material de carbono Termo moldável e extremamente leve.
- . **MSK100:** Estrutura de material leve e transparente.
- A sua conceção permite ao utilizador a máxima visão.
- As áreas almofadadas feitas de espuma adaptável permitem um ajuste personalizado.
- A peça traseira têxtil dá-lhe um sistema de cinta ajustável e adaptável à área occipital.

Efeitos:

- Protege seletivamente a zona nasal e orbital do rosto contra os choques, sem impedir a visão periférica.

Cor:

Ref.ª MSK100 - Transparente

Ref.ª MSK500 - Carbono/Preto

Dimensões:

Tamanho único

Instruções de utilização e colocação:

Colocar o invólucro sobre a testa e maçãs do rosto, e verificar se a área a ser protegida está livre e se não há contacto em nenhum ponto do invólucro. As almofadas de contacto podem ser cortadas para reduzir a espessura das mesmas, ou aquecidas para pequenas conformações. Se a curvatura das asas laterais precisar de ser modificada, a área a ser modificada deve ser ligeiramente aquecida com um ventilador, usando luvas de proteção térmica, e deixar arrefecer antes de ser substituída no utilizador. Colocar a peça occipital com a ponta do triângulo para baixo e encaixar as quatro extensões nas quatro ranhuras da caixa, apertando-as simetricamente umas às outras.

Precauções:

Seguir as instruções do fabricante para uma montagem correta da máscara. Seguir as instruções ou recomendações do prescriptor ou do pessoal de saúde. Para um ajuste personalizado, consultar um especialista. Em caso de dores persistentes, é aconselhável contactar um profissional de saúde. O

material utilizado é hipoalergénico, mas se ocorrer qualquer reação alérgica ou irritação, retire o produto e consulte o médico que o prescreveu. Colocar de forma que a compressão não seja excessiva. Em caso de dúvida, escolher o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de atividade. Retirar durante o repouso noturno. A escolha correta do tamanho adequado para cada paciente é essencial para obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e para prolongar a vida útil da ortótese. É condicionada pelas instruções do prescritor e deve, portanto, ser utilizada para os fins por ele indicados. Não expor a peça a uma chama ou fonte de calor a temperaturas muito elevadas.

Lavagem e Manutenção:

Lavar com um pano húmido e álcool. Não utilizar solventes. Lavar a parte têxtil à mão com sabão neutro, o velcro deve ser colado ou mantido fechado. Secar à temperatura ambiente. Não exponha a ortose ao calor direto.



Certificados de qualidade:

Todos os materiais utilizados foram testados, estão em conformidade com as normas europeias aplicáveis, são de elevada qualidade e oferecem a máxima segurança e conforto durante a utilização. Certificado Oko-Tex Standard 100: Rótulo têxtil ecológico atribuído após a realização de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais a partir dos quais uma peça de vestuário é fabricada.

Garantia:

Especialidades Médico Ortopédicas S.L. garante todos os seus produtos, desde que não tenham sido adulterados ou alterados e sempre dentro do quadro e dos prazos das disposições legais. Não estão incluídos nesta garantia os produtos cujas características tenham sido alteradas devido a uma utilização incorreta.

Aviso:

Para a eliminação do produto, utilizar o contentor de resíduos sólidos. Para a eliminação da embalagem, consoante o material de embalagem, utilizar o contentor de papel/cartão ou o contentor de plástico. Em todos os casos, a regulamentação do país deve ser rigorosamente respeitada. Qualquer incidente grave que envolva o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o doente estão estabelecidos.

 **EMO ESPECIALIDADES**
MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051



00001