

## Lava Cabeças Insuflável

**REF.812025**



## IMPORTANTE







Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer advertências, precauções ou instruções, contacte o seu profissional ou distribuidor de cuidados de saúde antes de utilizar este produto, ou risco e danos podem resultar desse uso.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um dispositivo de assistência. Ele ou ela irá aconselhá-lo sobre o uso mais apropriado para si.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

## SÍMBOLO QUE APARECE NA ETIQUETA OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço dos fabricantes		Peso máximo do utilizador
	Data de fabricação		Convite para consultar o manual do utilizador
	Número do lote		Siga as instruções de segurança
	Referência do produto		Conformidade CE
	Número de série		Não tolera humidade

## DESTINO DO PRODUTO

A bacia lava cabeças insuflável é um dispositivo médico. Este produto destina-se a ser utilizado por pessoas acamadas ou pessoas com mobilidade reduzida com a ajuda de um cuidador.

O cuidador pode lavar e enxaguar o cabelo do paciente sem ter de se dobrar sobre a bacia insuflável.

Tem um suporte fiável e adequado que suporta confortavelmente a cabeça e os ombros do paciente. Tem um apoio de cabeça integrado que pode ser ajustado em firmeza. Uma mangueira de drenagem de saída, conveniente permite que a espuma e a água escorram.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar em risco de ferimentos graves. Certifique-se de que todas as peças estão fornecidas e em bom estado de funcionamento.

Não coloque objetos pesados no artigo.

As pessoas com mobilidade reduzida não devem tentar utilizar este produto sem assistência. Se alguma peça estiver danificada, partida, gasta ou em falta, contacte o revendedor.

## USO

1. Insufle a bacia com ar por boca ou com uma bomba de ar (não incluída).
2. Coloque a bacia debaixo da cabeça do utilizador com a abertura no pescoço.
3. Coloque a extremidade da mangueira de drenagem num recipiente de resíduos impermeável. NOTA: Certifique-se de que o recipiente para a água se encontra abaixo do nível da bacia para que a água escorra corretamente. Se necessário, existe uma tampa de drenagem fornecida no fundo da bacia.
4. Após o Cabelo molhado, aplique champô e, em seguida, enxague com água.
5. Quando toda a água tiver drenado para fora da bacia insuflável, retire a bacia debaixo da cabeça do utilizador.
6. Enxaguar e secar cuidadosamente a bacia após a utilização. Mantenha-a insuflada durante várias horas após a utilização para assegurar que está completamente seca antes de dobrar e armazenar.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A não manutenção do seu produto pode resultar em risco de ferimentos graves.

- Limpe o produto regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos ou produtos à base de solventes.
- Seque com um pano macio, limpo e seco.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro.
- Em caso de avaria, não repare o produto por si mesmo. Consulte um revendedor autorizado

## MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Primeiro deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Previamente, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto tiver vindo inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar efetuar a reciclagem por si mesmo, peça à sua empresa local de gestão de resíduos para obter orientações sobre eliminação.

## ARMAZENAMENTO



A não observação das condições de armazenagem pode provocar a deterioração do produto e, conseqüentemente, o risco de ferimentos graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Mantenha-se afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenagem e armazenamento do seu produto.
- Em um lugar seco e temperado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões	O comprimento. 70 x Widt.60 x altura.15 cm
-----------	--

## PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A esperança de vida deste produto é de 2 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado enquanto estiver em bom estado.

## GARANTIA

Este produto é garantido por dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. As identidades fornecerão peças de substituição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabrico, design ou material. Contacte o distribuidor a quem adquiriu o produto no caso de precisar de fazer uma reclamação. As avarias resultantes de danos acidentais, utilização indevida, alteração ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o revendedor a quem adquiriu o produto para aplicar a garantia.



Identités - ZA Pole 49  
Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

