
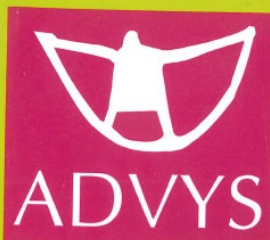


Sliplift

Esta ajuda foi desenvolvida para ajudar quem já não consegue alcançar os pés. Esta ajuda pode fazer a diferença entre independência e dependência para qualquer pessoa que não consiga alcançar os pés devido a artrite, dores nas costas, peso, gravidez ou idade.

- 1 - Coloque o Sliplift® no seu colo com as pegas viradas para si.
- 2 - Prender a roupa interior ao Sliplift® e fixar em cada canto.
- 3 - Colocar o Sliplift® com a roupa interior à frente das pernas.
- 4 - Vista a roupa interior e puxe o Sliplift® para cima dos joelhos.
- 5 - Retirar a roupa interior do Sliplift®.

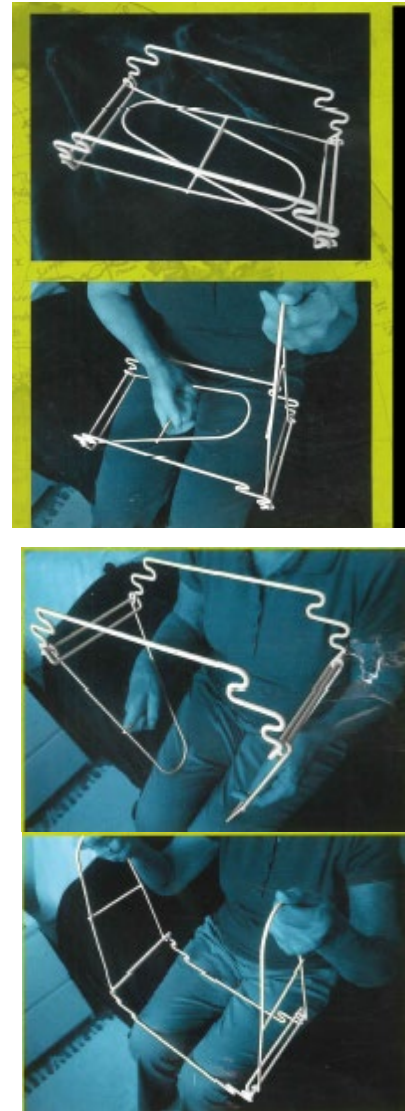

Produced by **ADVYS**
BE 0727 965 501
T 0032 (0)78 151 171
F 0032 (0)78 151 181
info@advys.be
www.advys.be

Sliplift® Traveler: slippersaantrekhelp,
opvouwbaar standaard - opening netto
34 x 18 cm

Sliplift® Traveler: enfile slip, pliable
standard - ouverture netto 34 x 18 cm

Pants aid Sliplift® Traveler

AD136939 146 - AD136939



5028318912360



ADVYS

