

**Finalidade:**

Colchão para a prevenção e tratamento de escaras, que podem ocorrer em todas as situações, que exigem em longo internamento hospitalar e/ou domiciliário. Colchão para kits PIUMA UP e DOMUS 1.

**Características:**

Colchão em PVC médico. Sem motor.

Peso do colchão: 2,3kg;

Peso máximo do utilizador: 135 Kg

Nº de células: 130;

Altura da célula inflada: 7,6 cm;

Espessura do material: 0,70mm

Nota: Colchão para kits PIUMA UP e DOMUS 1.

**Dimensões:** sem abas em operação 1950x880x76 mm ;

**Lote:** Verificar embalagem

**Cor:** Bege

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe II

**Modelo:** LAR052

**Marca:** Levitas Moretti Série Piuma UP

**Declaração de Conformidade:** Directiva CE 93/42

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Importador e Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Importador e Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Para limpar, passar sobre o compressor e o colchão um pano húmido com um detergente suave e mantenha o dispositivo longe de pó. Escolha sempre um detergente que não contenha agentes químicos que possam afetar as superfícies plásticas.

**Instruções de Utilização:**

O colchão vem enrolado: remova-o da caixa e desenrole o colchão sobre a cama; 3. Dobre e coloque as bordas do colchão entre a cama e o colchão para fixá-lo e evitar movimentos involuntários;

Conectar os tubos à extremidade inferior do colchão e às boquilhas do compressor e proceda como indicado no manual do compressor.

**Imagens do Artigo:**