

**Finalidades:** Capacete de proteção craneana almofadado, indicado para casos em que o paciente corre o risco de sofrer contusões craneanas, espasticidade, pessoas com epilepsia, risco elevado de queda em idosos ou com doenças degenerativas.

**Características:** Material respirável de três camadas. Abertura posterior para regulação do ajuste da cabeça por velcros. Regulação de pinos laterais. Proteção do queixo incorporada. Adequado para uso interior e exterior.

**Materiais:** SPE 100% exterior. Interior: Policloropreno e nylon.

**Cores:** Preto

**Dimensões:**

S (44-50 cm);

M (50-54 cm);

L (54-60 cm);

**Nota:** Circunferência da cabeça imediatamente acima das orelhas.

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** CDP54

**Marca:** EMO

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia), Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Lavar regularmente com água morna (máximo 30º), com sabão neutro e deixar secar ao ar. Durante a lavagem, os fechos de velcro devem estar fechados. Não expor a fontes de calor diretas (superfícies quentes ou luz solar). Deve estar totalmente seco antes de armazenar. O contacto com pomadas, cremes ou álcool podem deteriorar o artigo e encurtar a vida útil do produto.

**Instruções de utilização:** Colocar o capacete na cabeça. A área de ajuste deve ser na parte de trás do capacete. Ajustar o capacete à cabeça utilizando o velcro traseiro. Ajustar a correia do queixo, ajustando a sua tensão até o capacete estar firmemente no lugar. O utilizador deve inspeccionar regularmente o produto para se certificar de que esta em perfeitas condições e de que funciona corretamente.

**Precauções:** O produto deve ser utilizado estritamente como recomendado pelo médico ou técnico. Se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer, remover o produto e consultar o médico que prescreveu.

Inspeccionar o ajuste do produto para se certificar de que encaixa perfeitamente

**Imagens do Artigo:**

