

**Finalidade:** A almofada de aquecimento foi concebida para aquecer o corpo humano. Esta permite a aplicação direcionada do calor.

**Características:** ARTIGO DE ACORDO COM CE (diretiva europeia para produtos de baixa tensão, LVD 2006/95 / EC). TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTREGA 65 ° C ± 5 ° C (Ref. EN 60335-1: 2012 - EN 60335-2-17: 2013 - EN 62233: 2008)

## 6 temperaturas

• Nível 1 50 ° C \* • Nível 2 53 ° C \* • Nível 3 56 ° C \* • Nível 4 59 ° C \* • Nível 5 62 ° C \* • Nível 6 65 ° C \*

Tecido lavável no máximo 30 °

Desligamento automático após 90 min.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Artigo não médico

**Modelo:** LKT710

**Marca:** KYARA / ALPAK

**Dimensões:** 63 x42 cm

**Certificado CE:**

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:**

Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Não utilizar lixívia. Lavar à mão a uma temperatura não superior a 30°C. Não lavar a seco. Não secar na máquina de secar roupa. Não passar a ferro. Antes de efetuar a limpeza, certifique-se de que a almofada de aquecimento não está ligada à rede elétrica e de que está fria.

**Instruções de Utilização:** A almofada de aquecimento pode ser posicionada em partes do corpo como: zona cervical, ombros, costas, zona dorsal, zona lombar, zona abdominal e articulações, consoante o modelo na sua posse. Introduza a tomada do comando (4) na base do conector (5) para ligar o comando de regulação da temperatura à almofada de aquecimento. • Insira a ficha na tomada e selecione a temperatura. O intervalo de temperatura encontra-se entre o valor 1 (mínima) o valor 6 (máxima). • Posicione a almofada de aquecimento na parte do corpo que pretende aquecer. Função de desligação automática: A almofada de aquecimento está equipada com um sistema de paragem automática. Após 90 min. de funcionamento, desliga-se. • Para ligar novamente o aparelho, posicione o interruptor do seletor da temperatura na posição "0", aguarde alguns segundos e, de seguida, selecione de novo o nível de temperatura pretendido.

## Imagens do Artigo:

