

ANDARILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO AN100

Objetivo:

Um auxiliar de marcha para ajudar as pessoas que têm uma capacidade de marcha limitada.

Características:

Estrutura: Alumínio,

Punhos: PVC

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

Ponteiras antiderrapantes

Medidas: 50 x 40 x 75 – 92,5 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Alumínio

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: AN100

Marca: BMotion

Manutenção e armazenamento:

O andarilho deve ser inspeccionado regularmente para detetar sinais de danos ou desgaste. Verifique se existem:

- Danos na tubagem, incluindo quaisquer dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões de pressão gastos ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos.

Instruções de utilização:

1. Consulte um profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de mobilidade assistida.
2. Não se destina a ser utilizado em gelo ou outras superfícies escorregadias, pois pode escorregar.
3. Certifique-se de que os botões estão bem bloqueados na posição.
4. Tenha cuidado ao caminhar em terrenos inclinados/escorregadios e em superfícies irregulares.
5. Tenha cuidado ao andar para trás sobre obstáculos.
6. Nunca se sente e empurre com os pés.
7. Não suba ou desça escadas com o andarilho.
8. Não utilize o andarilho em escadas rolantes.
9. Em caso algum suba para o andarilho.
10. Cuidado ao usar saias compridas, as roupas podem ficar presas no volante

Images du produit: