

CANADIANA ALUMINIO COMFORT PRETO CM100

Objetivo:

As muletas são um auxiliar de mobilidade que transfere o peso das pernas para a parte superior do corpo.

São utilizadas por pessoas que não podem utilizar as pernas para suportar o seu peso, por razões que vão desde lesões de curta duração a incapacidades permanentes.

Características:

Alumínio anodizado + PVC

Punho macio e ergonómico, ponteira ajustável em ângulo, par, regulável em altura

Peso máximo: Utilizadores até 120 kg.

Ponteiras antiderrapantes

Vendido aos pares

Medidas: 76 a 95 (do punho ao chão)

Lote: Ver embalagem

Cor: Negro

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: CM100

Marca: BMotion

Manutenção e armazenamento:

Utilizar um pano húmido e sabão neutro.

Armazenar em local fresco e ventilado. Transporte: evitar pressões fortes, luz solar direta, chuva ou neve.

Instruções de utilização:

Utilizar para manter o peso fora da perna ou do pé.

1. Ajuste as muletas antes de as utilizar. Prima o fecho de mola com o dedo e ajuste-as para a altura adequada. A parte superior das muletas deve atingir 2,5 a 5 cm abaixo das suas axilas, quando está de pé e direito. As pegas das muletas devem estar ao nível da linha superior da anca. Os cotovelos devem dobrar-se um pouco quando utilizar as pegas. Segure a parte superior das muletas firmemente ao lado do corpo e use as mãos para absorver o peso. Não deixe que a parte superior das muletas pressione as suas axilas.

2. Andar: Incline-se ligeiramente para a frente e coloque as muletas cerca de um pé à sua frente.

Comece o passo como se fosse usar o pé ou a perna lesionada, mas transfira o peso para as muletas. O seu corpo balança para a frente entre as muletas. Termine o passo normalmente com a perna não lesionada. Quando a perna não lesionada estiver no chão, mova as muletas para a frente, preparando-se para o passo seguinte. Sentado: Recue para uma cadeira resistente. Utilize a sua mão para sentir o assento da cadeira e baixe-se lentamente para a mesma.

3. Certifique-se de que as pontas de borracha das suas muletas estão apertadas e estáveis. Se estiverem gastas, troque-as imediatamente.

Images du produit:

