

CADEIRA SANITÁRIA DOBRÁVEL 4 EM 1 BW650

Objetivo:

Dispositivo de assistência para a higiene e o duche. É uma ajuda técnica que permite às pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, que não podem fazer uso convencional do duche, permanecerem sentadas durante o banho. É também uma opção para melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem de incontinência.

Elevador de sanita, cadeira de banho, cadeira sanitária, Cadeira de rodas interior.

Características:

Estrutura em alumínio, 4 rodas em PVC. Apoios de braços e de pés amovíveis. Bacio incorporado. Assento e encosto almofadado.

Peso máximo: Utilizadores até 150 kg.

Bacio

Medidas: 53 x 87 x 89 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento / preto

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BW650

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

1. Não utilize as escadas rolantes para deslocar uma cadeira de rodas enquanto o utilizador estiver sentado. Podem ocorrer lesões corporais graves.

2. Não agarre em objectos em nenhuma das seguintes situações:

a. Se isso implicar que o utilizador tenha de se deslocar para a frente no assento.

b. Se o utilizador tiver de os apanhar do chão

3. Uma vez ajustado o apoio para os pés, é importante verificar se a regulação da altura e da inclinação não provoca fricção entre as costas das pernas e o estofado da cadeira.

4. Os apoios para os pés devem estar a pelo menos 65 mm do chão para evitar possíveis quedas.

5. Os travões devem ser bloqueados quando o utilizador se senta e quiser levantar a cadeira.

O produto deve ser armazenado a uma temperatura e humidade normais e mantido seco.

Instruções de utilização:

1. Antes de utilizar a cadeira de rodas, é aconselhável aprender as técnicas para se levantar, sentar, subir e descer escadas, rampas, etc.

2. Não subir e descer escadas sem ajuda.

3. Não é aconselhável inclinar-se para a frente (para atar os sapatos, apanhar algo do chão, etc.), pois o utilizador pode cair.

4. Nunca conduzir a cadeira de rodas sobre as rodas traseiras.

5. Nunca transporte a cadeira de rodas pelos apoios de braços, pois isso pode danificar a estrutura da cadeira de rodas. Certifique-se de que os apoios de braços estão corretamente posicionados.

6. Não efetuar modificações (alterações mecânicas) na cadeira de rodas para não comprometer a sua segurança de utilização.

7. Respeitar sempre o peso máximo da cadeira de rodas de 150 Kg.

8. A cadeira é fornecida com o encosto, as partes do assento e os passos separados. Inserir as duas extremidades dos tubos do encosto e do assento

Imagem do produto:



Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47

comercial@greenvisco.com

+351 925 568 105

export@evoluxionhealth.com