

SISTEMA UNIVERSAL DE RETENÇÃO ABDOMINAL E PERINEAL EV200 – EV210

Objetivo:

Os cintos de retenção Evoluxion são dispositivos concebidos para melhorar a estabilidade e a segurança de uma pessoa numa cadeira de rodas ou poltrona. Este tipo de cinto tem múltiplas funções e vantagens: 1- Segurança e prevenção de quedas: o cinto de retenção ajuda a manter a pessoa segura na sua cadeira de rodas ou poltrona, evitando escorregões ou quedas acidentais, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida ou fraqueza muscular.

2- Estabilidade e postura: o cinto também pode fornecer um apoio adicional para manter uma postura correta. Ajuda a evitar que a pessoa deslize para a frente ou fique instável, o que é especialmente importante para as pessoas que têm dificuldade em manter o equilíbrio.

3- Apoio perineal: a componente perineal do cinto pode evitar que a pessoa deslize para a frente ou se desequilibre, especialmente quando a pessoa está numa posição sentada durante um período de tempo prolongado.

4- Aumento do conforto: Ao manter o utilizador numa posição mais estável, pode reduzir o desconforto ou o incómodo resultante da deslocação na cadeira.

5- Facilita a atenção: Em alguns casos, este tipo de cinto também pode ajudar os cuidadores a facilitar o transporte ou o manuseamento da pessoa, proporcionando um ponto adicional de contenção sem causar desconforto.

Características:

Cinto universal: adequado para todos os tipos de cadeiras de rodas e poltronas. Possui uma extensão para adaptar o cinto da cadeira de rodas à cadeira de braços.


Modelos:

EV200 - Abdominal. Possui uma extensão.

EV210 - Perineal. Possui duas extensões. Fivela de substituição facilmente substituível.

Composição: Laminado cinzento 100% poliéster

Medidas:

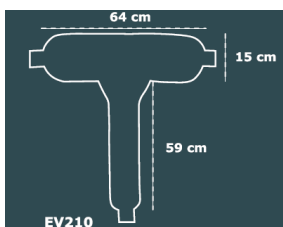

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV200, EV210

Marca: EvoSense

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão a uma temperatura máxima de 40 graus. Secar na posição horizontal. Evitar fontes de calor. Não utilizar lixívia ou produtos abrasivos. Não secar na máquina de secar roupa, secar naturalmente. Não branquear; não passar a ferro.

Instruções de utilização:

Cinto de sujeição para Cadeira de Rodas ou cadeirão, com sistema de fitas ajustáveis muito confortáveis e fáceis de usar. Conveniente de usar graças à sua instalação rápida e fácil. **AUMENTO DE SEGURANÇA:** Sistema para fixação a cadeira de rodas ou cadeirões.

Possui fitas de regulação ajustadas à medida desejada - Medida Adaptável.

*** PROTEÇÃO NA CADEIRA DE RODAS OU NO CADEIRÃO:** Elimine o risco de quedas e deslocação lateral. É fixado na parte traseira.

Imagem do produto:



Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105

export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47

comercial@greenvisco.com