



KYARA®



SACO GELO INSTANTANEO 13X18CM
- ST397

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções:

1. Pressione com as duas mãos em direção ao centro até que a bolha interna se rompa.
2. Agite a bolsa para misturar o conteúdo.
3. Aplicar na parte afetada.

Indicações de Utilização:

Hematomas, Entorses, Traumas, Hipertermia e em todos os casos em que a crioterapia e o uso de frio são necessários.

Atenção:

Apenas para utilização externa, utilização única.

Não utilize a embalagem se esta estiver danificada.

Não abra a bolsa e não faça com que o conteúdo se entorne.

O conteúdo da bolsa mancha e pode causar irritação (em caso de contacto enxague a área com água por 15 minutos).

O conteúdo da bolsa é nocivo (se ingerido, procure imediatamente atendimento médico).

Conserve à temperatura ambiente fora do alcance de crianças, longe de fontes de calor e materiais inflamáveis.

Não aplicar na pele ferida.

Contactar o seu médico em caso de doenças cardiovasculares e circulatórias, diabetes e /ou insensibilidade cutânea (síndrome de Raynaud), aplicável a lactentes, crianças e idosos em caso de dúvida sobre o tratamento a realizar e se a sintomatologia persistir.

Conteúdo:

Ureia, cloreto de amónio e água.