

**Finalidade:**

Marquesa portátil dobrável de madeira com 3 corpos ideal para espaços reduzidos para facilitar o trabalho de Esteticistas, Osteopatas, Terapeutas, Massagistas. Fácil manutenção.

**Características:**

Pele sintética (PVC); Espuma de densidade 20Kg/M<sup>3</sup> e madeira

Ajustável em altura

Espessura de espuma: 4 cm

Peso máximo suportado: 250 Kg

Peso da marquesa: 17,5 Kg

Inclui: Saco de transporte com rodas, apoio de cabeça ajustável, almofada de rosto, prateleira suspensão de braços e 2 apoios laterais de braços.

**Dimensões:**

Comprimento 195 (220 cm inclui encosto de cabeça) x largura 70 cm (90 cm inclui apoio de braços)

**Cor:** Azul

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Modelo:** 40402

**Certificado:**

**Fabricante:** Calvo Izquierdo S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN) ; [www.calvoizquierdo.es//](http://www.calvoizquierdo.es//)  
[www.calvoizquierdo-medica.es](http://www.calvoizquierdo-medica.es)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Certifique-se que a marquesa é usada numa zona plana para garantir estabilidade. Não use o equipamento se houver danos na estrutura. Manter a marquesa limpa e seca. Manter objetos cortantes afastados para não provocar danos.

**Instruções de Utilização:**

Certifique-se que a marquesa é aberta numa zona plana. Retire a marquesa do saco. Abra os fechos e coloque a maca sobre os pivôs parcialmente abertas. Retire todos os acessórios do interior. Abra a marquesa completamente e ajuste em altura. Os apoios de cabeça e de braços são inseridos nos orifícios correspondentes.

**Imagens do Artigo:**