

Manual do utilizador / instruções para utilização

Auxiliares_ de Posicionamento

POSIMED®

Leia atentamente as instruções e as notas de segurança antes de utilizar os sistemas para garantir um funcionamento seguro!

Âmbito de entrega

- Apoio ao posicionamento POSIMED® com cobertura de PU azul e costuras soldadas
- Manual do utilizador

Indicações /Contraindicações

- Indicações: Terapia e profilaxia de úlceras de pressão e posicionamento de pacientes com dor.
- Contraindicação: Nenhum

Gama de aplicações

- O posicionamento ajuda em várias formas e tamanhos para garantir um posicionamento ideal para a profilaxia decubitus e suporte terapêutico.

Peso do paciente

- Adequado para todos os pesos do paciente

Dados técnicos

- Ajuda de posicionamento preenchida com microesferas de polipropileno

Neopolen	Densidade 13 - 17 kg/m ³
----------	-------------------------------------


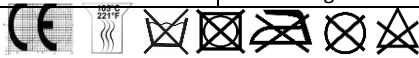
Dimensões

- Várias formas e tamanhos

Peso

- 0,2 kg a 1 kg

Limpeza e manutenção

Uso domiciliários	Clínico de cuidados
Durante uma utilização	
Desinfecção de cobertura limpando	Desinfecção de cobertura limpando
	
Depois de mudar o paciente	
Desinfecção de cobertura limpando	Desinfecção de cobertura limpando
Desinfecção de cobertura limpando	Autoclavagem
	

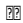
Segurança técnica / Retardamento da chama

- DIN EN 597 I + II Retardamento de chama

Teste toxicológico / Biocompatibilidade

- DIN EN ISO 10993-5; DIN EN ISO 10993-1

Preparar o sistema de utilização

- Retire o auxílio de posicionamento da embalagem!
-  O sistema está pronto a ser utilizado agora.

Avisos

- Nenhum.

Garantia / Garantia

- A garantia legal é de 6 meses e a garantia legal é de 2 anos. As condições de garantia alargadas podem ser encontradas nas descrições do produto.

Nome do produto

- Apoio de posicionamento POSIMED®

Fabricante de acordo com o MPG (German Medical Devices Act)

Funke-Medical AG

Ährenfeld 10

46348 Raesfeld

Tel.: (+49) 2865/266 93 50

Fax: (+49) 2865/8133

info@funke-medical.de

www.funke-medical.de