

## SANILUXE PRETO

**Finalidade:** Almofada anti escara, previne o aparecimento de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo. Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Grau de risco Médio.

**Características:** Saniluxe – Inodor, antibacteriano, antifungos, antiácido, antipercevejo, antimancha; impermeável, macio, transpirável. Capa impermeável. Exterior: Poliuretano

Interior: Enchimento de fibra poliéster siliconada

**Peso máximo:** 80 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 114115

**Marca:** UBIO Qualitylife

**Dimensões:** 44x44x11 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15

Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR

**Manutenção e armazenamento:** Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. **Não molhar o conteúdo da almofada.** Capa lavável à mão ou na máquina com detergente neutro a uma temperatura máxima de 95°C . Não usar centrifugação. Não usar lixívia.

**Instruções de Utilização:** Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro. Têm fitas que seguram a almofada ao assento, evitando movimento e/ou deslizamento.

**Imagens do Artigo:**

